

唾液の「におい」を、官能と B/B チェッカーで測る

アテイン インキュベータ システム mBA-450

唾液の in vitro 官能検査と、B/B チェッカーによる機器測定の内用

口臭患者さんへ、感覚的に自分の「におい」を知ってもらう為の画期的なツールです。
患者さんが一番伝えなかった、自分の口臭を的確に再現可能。モチベーションに最適。



測定手順

1. アテイン インキュベータ システムに精製水を張り、スイッチを入れる
2. 唾液を採取してサンプル・コンテナに入れる
3. 37°C±1 表示の、アテイン インキュベータ システムにセットする
4. B/B チェッカーの**OGモード**で測る



TAIYO Instruments Inc.

Osaka, 536-0025 JAPAN

B/B チェッカーによる唾液測定について


測定手順

- ① 採取した唾液をすべて「サンプル・コンテナ」（プローブ・アダプター付き）に入れます。
- ② B/B チェッカーの「OGモード」で測ります。
 - a. 「サンプル・コンテナ」を、水の温度が $37^{\circ}\text{C} \pm 1$ 表示のアテイン インキュベータ システム (mBA-450) にセットし、B/B チェッカーの操作通り測定します。
 - b. プローブを「サンプル・コンテナ」に挿入するときは、アテイン インキュベータ システムの回転を停止してからにします。
- ③ 測定後は、清水で洗浄し、次の測定に備えておきます。

測定上の注意事項

- ① 「サンプル・コンテナ」をアテイン インキュベータ システムにセットするときに、水が溢れないようにしてください。
- ② アテイン インキュベータ システムの水の温度は $37^{\circ}\text{C} \pm 1$ の範囲であることを確認してください。
- ③ アテイン インキュベータ システムは、空回しせず、必ず精製水を入れてご使用ください。
- ④ B/B チェッカーのプローブが湯気で濡れたときは乾いた布で拭いてください。
絶対にアルコール等の含有したものを使用しないでください。間違った値が得られるだけでなく、B/B チェッカーのセンサーが破損します。
- ⑤ 使用済みの「サンプル・コンテナ」は、水道水で洗浄して、清水で洗った後、確実に乾燥してからご使用ください。

測定例

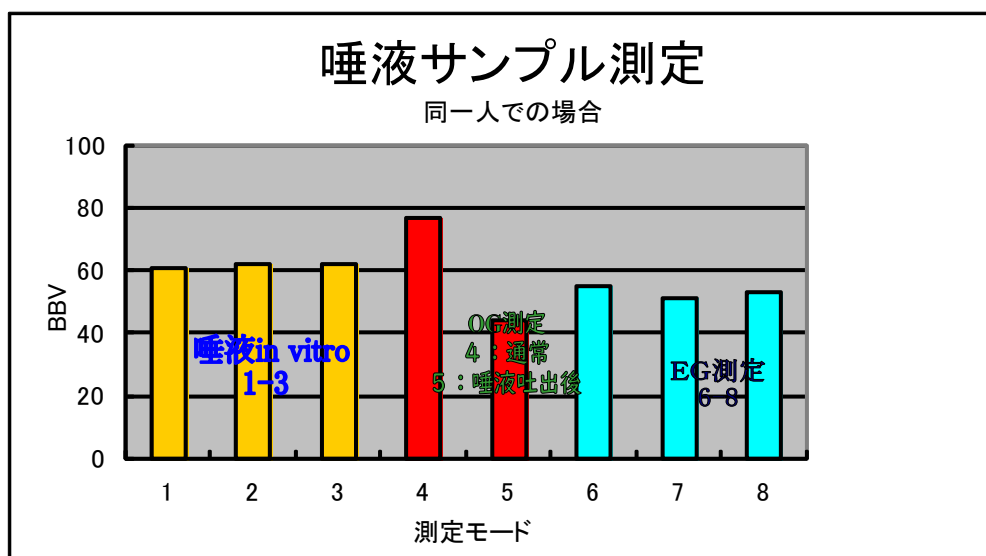

お問い合わせ先

株式会社タイヨウ

Tel:06-6969-2421 Fax:06-6969-2422

Emai:info@t-taiyo.com URL:www.t-taiyo.com