

Easyシリーズ



Easy is Easy!



項目毎に独立したイオン選択電極 (ISE)



廃液容器も一体化された試薬パック



オプション品の21検体バッチ処理可能なサンプラー
(一部接続できない機種あり)

- 操作は簡単な対話方式。
- 日本語表示のディスプレイ。
- 日常の保守はクリーニング液での洗浄のみ。
- 試薬パックは廃液容器も一体化。交換はワンタッチ。
- **Easy**と**Easy-Ca**は透析液測定モードを設定。
- 21検体バッチ処理可能なサンプラーをオプションで用意。
(一部接続できない機種があります)

Easyシリーズ ラインアップ

コードNo.	E2004	E2014	E2015	E2021	E2016
品名	Easy	Easy-PLUS	Easy-Li	Easy-PLUS/Li	Easy-Ca
測定項目	Na ⁺ ・K ⁺	Na ⁺ ・K ⁺ ・Cl ⁻	Na ⁺ ・K ⁺ ・Li ⁺	Na ⁺ ・K ⁺ ・Cl ⁻ ・Li ⁺	Na ⁺ ・K ⁺ ・Ca ²⁺ ・pH

特長

1. 簡単な操作と優れた信頼性

YES、NOの2つのキーで、日本語表示ディスプレイに答えるだけの簡単な操作。自動キャリブレーション機構。装置の状態を常にチェックする、自己診断機能。信頼性の優れた測定結果が得られます

2. 試薬パック

標準液を含む全ての試薬と廃液容器を一体化。

試薬パックの交換は簡単です。

また、測定しない時はスタンバイモードに設定する事で試薬が節約できます。

3. 簡単な電極交換

電極は個別に交換でき経済的です。エージングや交換に時間のかからないのも特長です。

4. やさしいメンテナンス

チューブ詰まりのない流路設計。日常保守は検査終了後の専用クリーニング液およびリンス液での流路洗浄のみ。メンテナンスに時間がかかりません。

5. 検体や廃液に触れない安全設計

サンプリングのたびにノズルに付着した検体を拭き取る必要のない機構。さらに廃液容器を試薬パックと一体化したことにより検体との接触が最小限ですみます。

6. 透析液測定モード

Easyには血液測定モードに加え、透析液測定モードを設定。

7. 精度管理機能

正常・異常値コントロール測定値を各20測定分メモリ。統計処理プログラムも標準装備。**Easy**シリーズ用の精度管理キットも別売りで用意しています。

品名 E2814 精度管理用キット(2濃度各1本)

8. オプション

21検体をバッチ測定できる**Easy サンプラー**E2070をオプションで用意。不意のノズル接触からオペレーターを守る赤外線検知機構。精度管理、STAT(緊急割り込み)検体は、専用ポートにセット。

仕様

コード No.	E2004	E2014	E2015	E2021
品名	Easy	Easy-PLUS	Easy-Li	Easy-PLUS/Li
測定原理	イオン選択電極法(ISE法)			
測定項目	Na ⁺ ・K ⁺	Na ⁺ ・K ⁺ ・Cl ⁻	Na ⁺ ・K ⁺ ・Li ⁺	Na ⁺ ・K ⁺ ・Cl ⁻ ・Li ⁺
試料量(血液)	全血、血清、血漿:100μl			
試料量(尿)	希釈尿(1:10):400μl		← *1	
試料量(透析液)	透析液:100μl		— *2	
透析測定モード	有		—	
測定時間	血液・透析液:60秒		血液:60秒 尿:90秒 *1	
メモリ機能	測定値	検体:100測定分		検体:125測定分
	精度管理	正常・異常値コントロール各20測定分		
補正機能	各項目毎に測定値の補正が可能			
オプション	E2070 Easy サンプラー			
外形寸法	24(W)×42(H)×20(D)cm			
重量	5.8kg			
電源	100V 50Hz/60Hz 0.8A			

*1 Li⁺については尿の測定はできません。

*2 透析液測定モードは設定されていませんが、血液測定モードでの測定は可能です。

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

測定範囲

項目	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	Li ⁺
血液	20~200 mmol/L	0.2~40 mmol/L	25~200mmol/L	0.2~ 5.0mmol/L
尿	25~1000mmol/L	1.0~500mmol/L	25~500mmol/L	—
透析液	20~200 mmol/L	0.2~40 mmol/L	25~200mmol/L	—

【製造販売元】

株式会社タイヨウ

〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮2-4-29

TEL 06-6969-2421 FAX 06-6969-2422

URL: www.t-taiyo.com E-mail: info@t-taiyo.com

第二種製造販売業許可番号: 27B2X90003

取扱店